



JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA BOLESTI
OVISNOSTI KANTONA SARAJEVO

Adresa: Nahorevska br. 173
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel: 033 257 750; Fax: 033 257 751
e-mail: zalnarc@bih.net.ba
www.zalnarc.net

POLITIKE I PROCEDURE:
Standard 5,28 i 50
Kriterij 5.85,86; 28.38 i 50.30,66;
Grupa 1,5 i 6

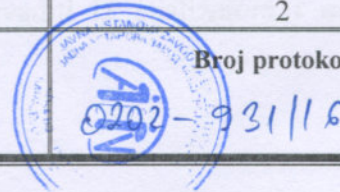
Datum usvajanja: 31.10.2016
Planirana revizija: oktobar 2019.

NASLOV: STANDARDNI POSTUPAK KOD UTVRĐIVANJA PRISUTNOSTI
PAS U UZORKU SALIVE

UKUPNO STRANICA:
2

Odobreno od strane direktorice ustanove:
Doc. dr sci med. Nermina Mehić-Basara
Prim. Spec. neuropsihijatar
Subspecijalista za bolesti ovisnosti

Broj protokola:



1. Opšta izjava o politici

Procedura skrining testa na PAS utvrđuje se analizom uzorka salive putem analizatora, sistemom Drager Drug Test 5000. Postupak se obavlja u cilju dijagnostike i planiranja zdravstvene njege i terapije.

2. Područje primjene

Ova procedura se primjenjuje na nivou Ambulante Zavoda, na Odjeljenju za liječenje Narkomanije i Odjeljenju za liječenje Alkoholizma

3. Distribucija i nadzor

3.1 Šefovi odjeljenja i glavne sestre Odjeljenja.

3.2 Procedura treba da je postavljena na vidno mjesto, dostupna medicinskim sestrama i doktorima.

3.3 Glavne sestre Odjeljenja vrše nadzor za primjenu ove procedure.

3. Procedura / opis postupka

Utvrdjivanje postojanja psihoaktivnih analita (amfetamina, benzodijazepina, kokaina, metadona, metamfetamina, opijata i THC/kanabisa), u ljudskom uzorku salive, dokazuje se kvalitetno mjernim postupkom putem sistema za testiranje Drager Drug Test 5000. Uzorak salive reagira sa mikročesticama koje su prevučene antitjelima i konjugatima droge na testnoj traci. Uzimač uzoraka prije i nakon uzimanja uzorka se ne smije dodirivati golim rukama te je važno pridržavati se uobičajnih higijenskih pravila. Prije testiranja ne treba pušiti najmanje 10 minuta. Temperatura okruženja treba da iznosi između $+5^{\circ}\text{C}$ do $+40^{\circ}\text{C}$, a relativna vlažnost 5% i 95% r.vl. Uputiti pacijenta da uzimač uzorka stavi u usta između obraza i desni, ne smije žvakati niti sisati uzimač uzorka. Dovoljne su 4 minute kako bi se prikupila dovoljna količina uzorka salive.

4.2. Planiranje i provođenje postupka

4.2.1. Priprema pribora i materijala

- Analizator drager Drug test 5000
- uzimač uzorka
- rukavice
- posuda za nečisto

4.2.2. Provođenje postupka

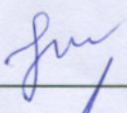

- Predstaviti se, identificirati pacijenta, objasniti postupak i svrhu, dopustiti pitanja
- Osigurati privatnost
- Navući rukavice, otvoriti folijsku vrećicu, provjeriti ispravnost

- Skinuti zaštitnu kapicu s uloškom s uzimača uzorka testne kasete te testnu kasetu dati pacijentu
- Uputiti pacijenta da uzimač uzorka stavi u usta između obraza i desni te da ga oprezno pomiče s jedne strane na drugu te da ne smije žvakati niti sisati uzimač uzorka
- Promatrati pokazivač uzimanja uzorka najmanje 4 minute dok se ne pojavi plava boja na pokazivaču koja je pokazatelj dovoljne količine salive
- Uključiti analizator uređaj
- Preuzeti testnu traku, otvoriti vrata analizatora i ugurati testnu kasetu u donji pretinac analizatora sve dok se čujno ne uglavi
- Skinuti uložak sa zaštitne kapice i ugurati uložak u gornji pretinac analizatora sve dok se čujno ne uglavi, zatvoriti vrata
- Analizator automatski pokreće analizu te po završetku analize prikazuje rezultate na zaslonu i pohranjuje u memoriju analizatora. Svi podaci se mogu ispisati pisačem Drager Mobile Printer
- Testnu kasetu sa postavljenim uloškom nakon analize izvaditi iz analizatora i odložiti u infektivni otpad
- Isključiti analizator
- Skinuti rukavice
- Oprati ruke
- Dokumentovati

4. Svrha postupka

Svrha postupka je utvrđivanje prisutnosti PAS u uzorku salive za dijagnostičke svrhe te planiranju zdravstvene njege i terapije medicinskih sestara/tehničara koji obavljaju postupak.

5. Revizija ove procedure vrši se svake 3 godine, po potrebi i ranije.

Uradio	Ime i prezime / radna grupa Edita Jahić med.sestra Lejla Šabanović med. sestra	Verifikacija (potpis)
Koordinator Pregledao / saglasan	Magbula Grabovica , magistar zdravstvene njege i terapije	
Odobreno od strane direktorice ustanove:	Doc. dr sci med. Nermana Mehić Basara Prim. Spec. neuropsihijatar Subspecijalista za bolesti ovisnosti	 A0427 Dr. sci med. NERMANA MEHIĆ BASARA Prim. spec. neuropsihijatar Subspecijalista za bolesti ovisnosti
		Datum usvajanja 31.10.2016.